

ARIONE0

HORSE DATA SCIENCE


NOTICE **D'INSTALLATION**

Systeme Sangle Tout-en-un

Comment installer EQUIMETRE ?

Avant de débuter l'installation de votre Equimetre, vous devez avoir sellé votre cheval comme vous le faites habituellement.


1 HUMIDIFIEZ LES 2 ÉLECTRODES

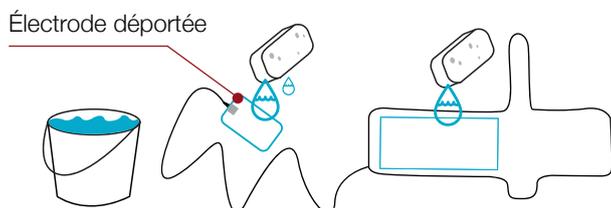

Attention : Ne pas immerger EQUIMETRE et ne pas retirer les mousses.


Humidifiez la mousse et l'électrode déportée. Ne jamais utiliser Equimetre sans la mousse.

2 ALLUMEZ EQUIMETRE

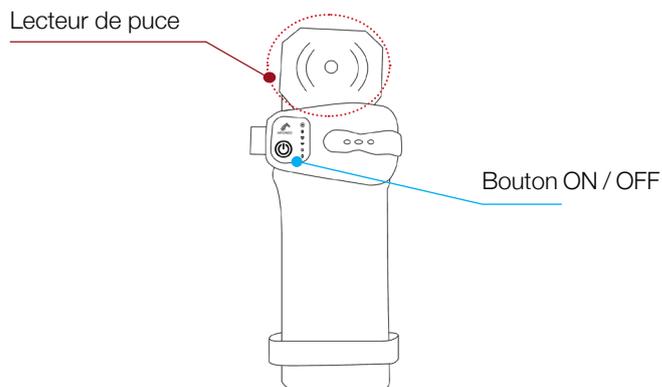

Allumez le capteur EQUIMETRE en appuyant 1 fois sur le bouton. La première LED blanche clignote.

3 CHERCHEZ LA PUCE VÉTÉRINAIRE DU CHEVAL

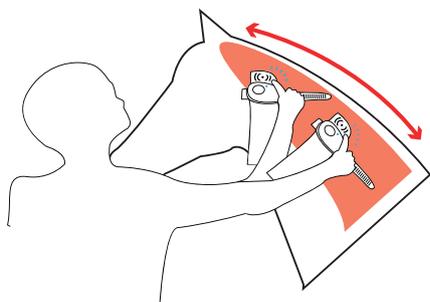


Cherchez la puce vétérinaire du cheval en scannant l'encolure avec le lecteur de puce. Allez du garrot aux oreilles **DOUCEMENT** jusqu'à entendre un bip sonore.

OU

Appuyez 3 fois sur le bouton pour démarrer un entraînement manuellement. L'identité du cheval pourra ensuite être assignée à la fin de l'entraînement.


Un bip sonore indique que l'entraînement a commencé. La première LED blanche se fixe.

4 INSTALLEZ L'ÉLECTRODE DÉPORTÉE

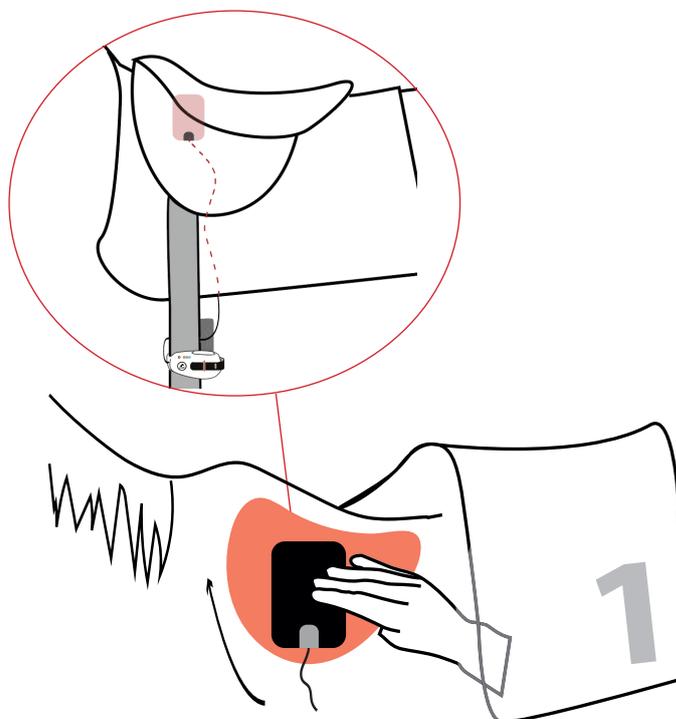


Placez l'électrode déportée dans le **creux du garrot à gauche, sous le tapis de selle**, en contact direct avec la peau du cheval.


5 INSTALLEZ LE CAPTEUR SUR LA SANGLE

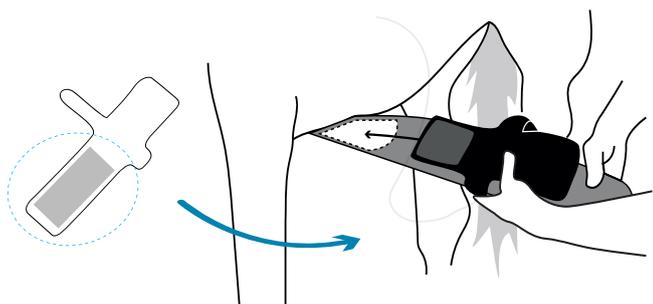


Glissez le capteur sur la sangle, en disposant la seconde électrode contre la peau de votre cheval.

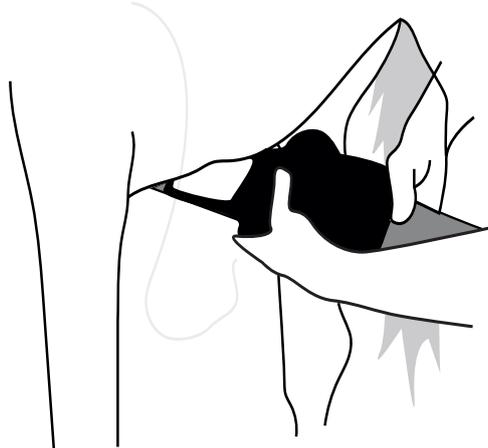


Avancez votre capteur pas plus loin que le milieu du ventre, et sécurisez le boîtier en attachant le passant.

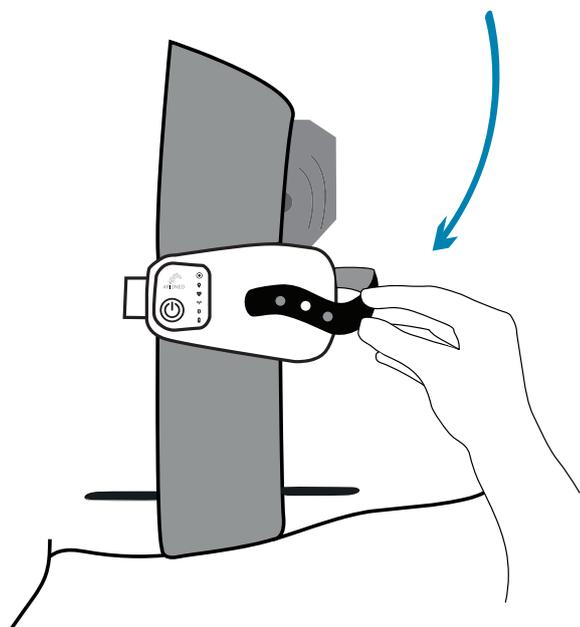


6 PASSEZ LE CÂBLE ENTRE LE LECTEUR DE PUCE ET LA SANGLE

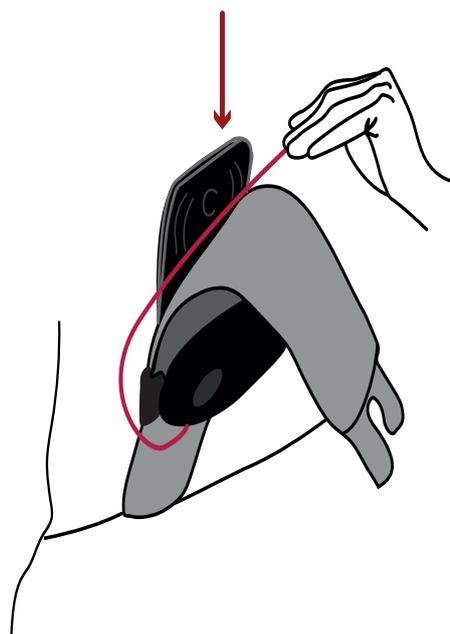

7 SANGLEZ LÉGÈREMENT VOTRE CHEVAL


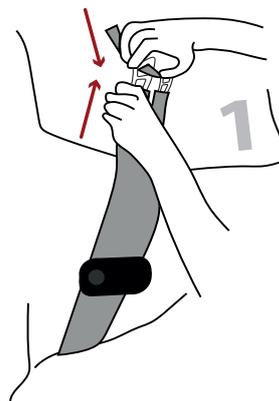


8 PASSEZ LE CÂBLE RESTANT SOUS LE TAPIS

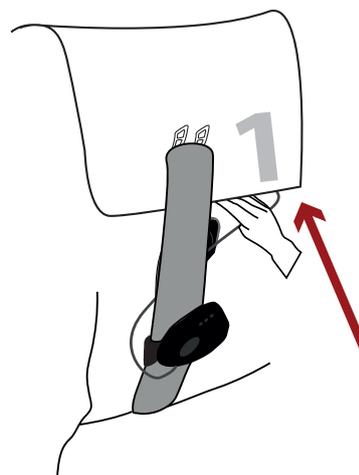


Afin de ne pas gêner le pied du cavalier.

9 PUSSEZ LE COUDE DU CAPTEUR CONTRE LA SANGLE

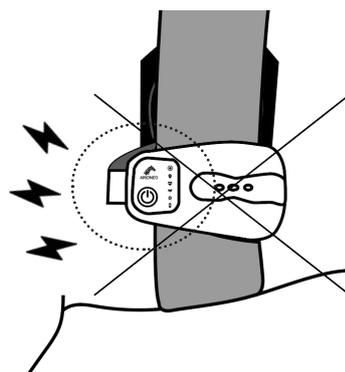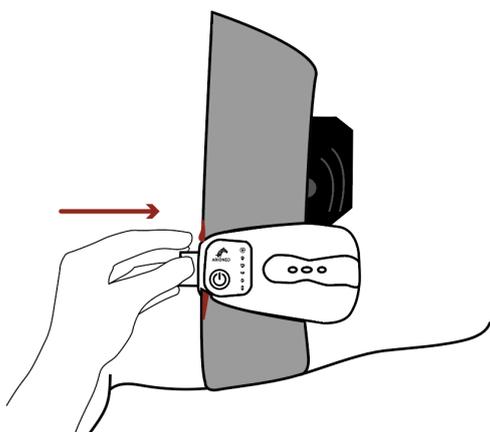


Autrement le coude risque de pincer / blesser le cheval au galop.

10 ASSUREZ-VOUS QUE LE CAPTEUR EST CORRECTEMENT INSTALLÉ

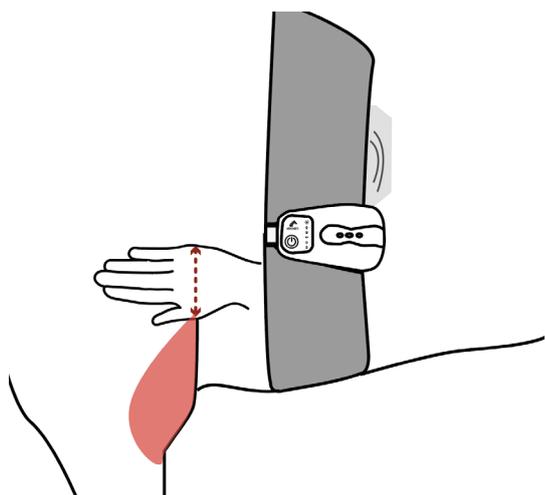

Il doit pouvoir y avoir une main placée à l'horizontale entre le capteur et le coude de votre cheval. Ceci est une précaution afin d'éviter les frottements pendant l'entraînement.

11 FERMEZ LES SCRATCHS AUTOUR DE LA SANGLE

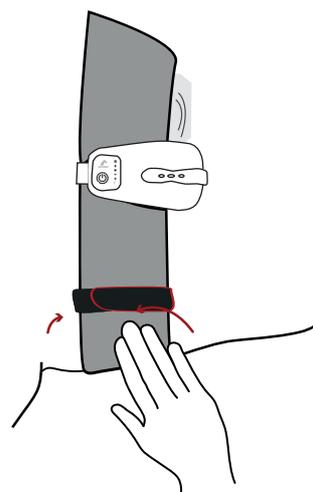

12 VÉRIFIEZ QUE LE CARDIO FONCTIONNE CORRECTEMENT



La première LED blanche doit être allumée et fixe.




La deuxième LED verte indique le GPS, elle clignote jusqu'à avoir trouvé le signal. **NB:** elle peut clignoter lorsque vous êtes dans un endroit couvert, elle se stabilisera lorsque vous serez en extérieur.



La troisième LED rouge symbolise la fréquence cardiaque. Une fois le capteur correctement installé, cette dernière clignote au rythme du cœur de votre cheval.

13 VOUS ÊTES PRÊTS À PARTIR SI

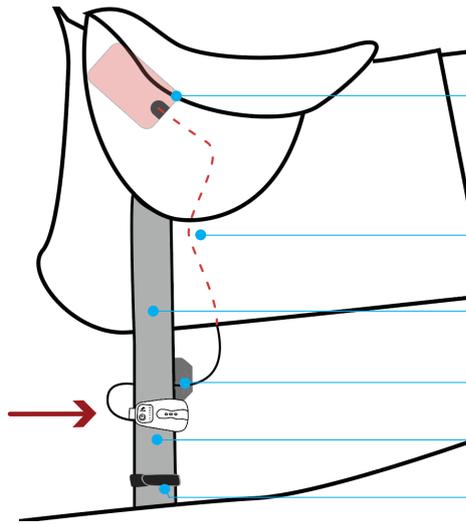

L'électrode déportée est humidifiée et disposée dans le creux du garrot à gauche.

Le câble est placé sous le tapis pour ne pas gêner le pied du cavalier.

Votre cheval est sangle pour assurer une bonne conductivité du signal cardiaque.

Le câble est placé entre la sangle et le lecteur de puce.


Le coude est en butée contre la sangle.

Les scratches sont fermés.

Comment enlever votre EQUIMETRE ?

À la fin de votre entraînement, il est important d'enlever votre EQUIMETRE en suivant les indications expliquées ci-dessous.

1 ÉTEIGNEZ LE CAPTEUR

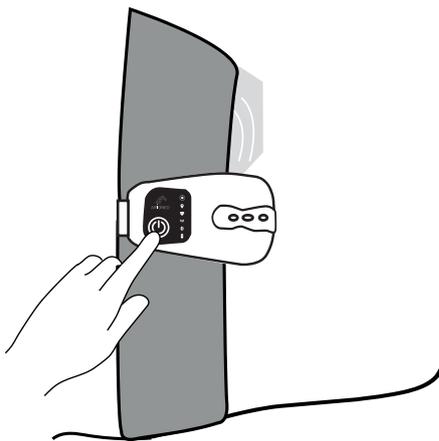


Éteignez le capteur EQUIMETRE en appuyant 3 secondes sur le bouton. Toutes les LEDs s'éteignent.

2 ATTRAPEZ L'ÉLECTRODE DÉPORTÉE




Attention : Ne pas tirer sur le câble de l'électrode. Il faut aller l'attraper avec votre main sous la selle.

3 RETIREZ LE CAPTEUR AVANT DE DESSELER

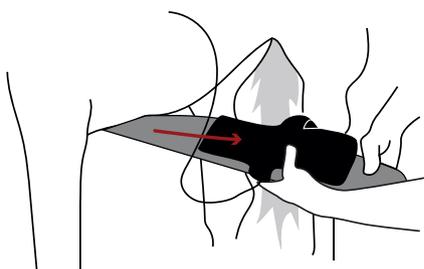

Détachez les scratches et l'attache afin d'enlever le capteur.

4 RECHARGEZ LE CAPTEUR EQUIMETRE

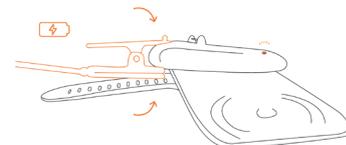


Attention : Hors utilisation, veillez à toujours brancher EQUIMETRE à la pince d'alimentation et vérifiez que le capteur est bien éteint. La LED orange de chargement est allumée.

Comment synchroniser vos données ?


À la fin de votre entraînement, récupérez les données du capteur grâce à votre téléphone.

1 CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION EQUIMETRE

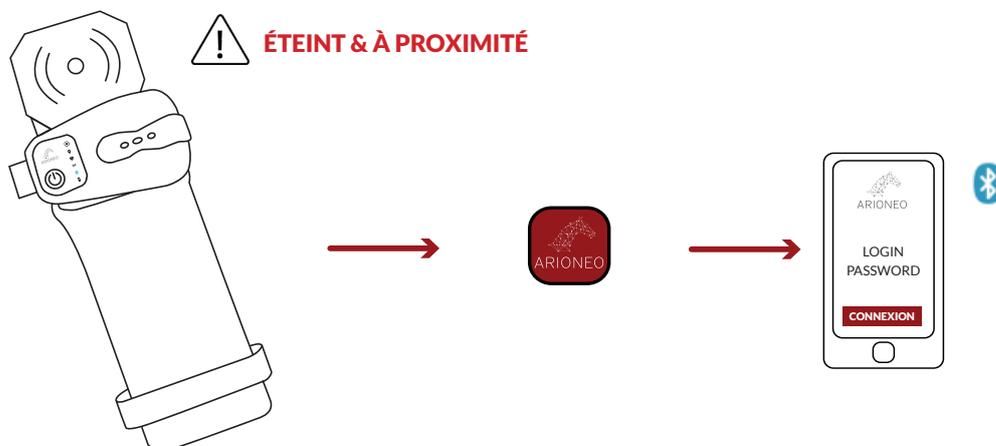

2 CLIQUEZ SUR LE BOUTON «SYNCHRONISER»


! ÉTEINT & À PROXIMITÉ

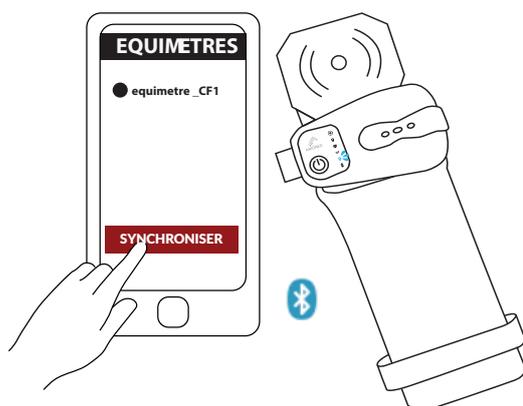

La jauge de téléchargement avance jusqu'à 100%.

Votre téléphone doit être proche du capteur. La LED bleue du bluetooth doit se mettre à clignoter.

3 DANS L'ONGLET «ENTRAÎNEMENTS» VOUS RETROUVEZ LA LISTE DES ENTRAÎNEMENTS TÉLÉCHARGÉS

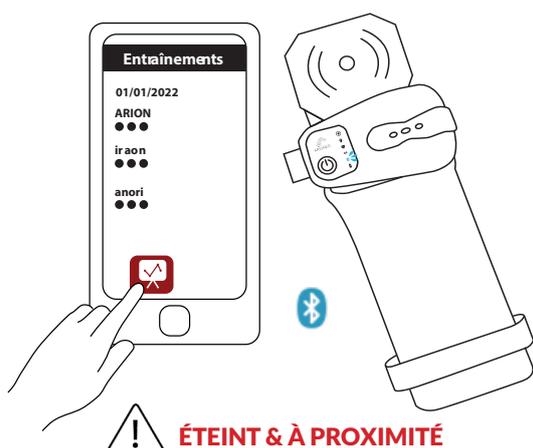

Les entraînements s'envoient automatiquement sur les serveurs afin que vous puissiez les retrouver depuis n'importe quel appareil sur la plateforme web Equimetre.com.

Cliquez sur l'entraînement pour le consulter directement depuis l'application.