

ARIONE

HORSE DATA SCIENCE


NOTICE **D'INSTALLATION**

Système Tapis & Ceinture

Comment installer EQUIMETRE ?

L'installation de votre EQUIMETRE débute avant que vous ayez commencé à seller.


1 HUMIDIFIEZ LES 2 ÉLECTRODES

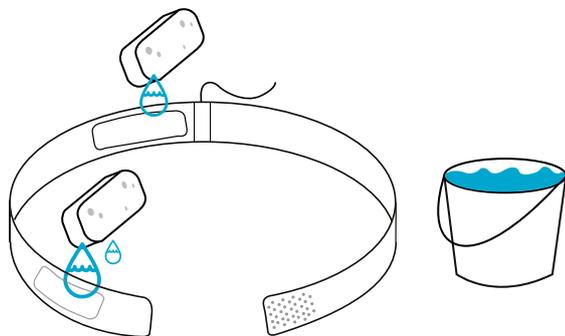

Attention : Ne pas immerger le câble et ne pas retirer les mousses.


Humidifiez la mousse des deux électrodes. Ne jamais utiliser Equimetre sans les mousses.

3 ALLUMEZ EQUIMETRE

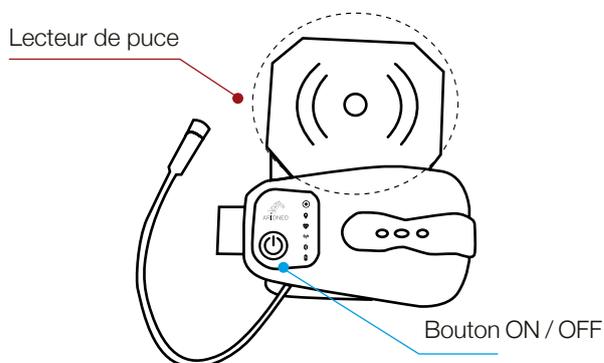


Allumez le capteur EQUIMETRE en appuyant 1 fois sur le bouton. La première LED blanche clignote.

2 INSTALLEZ LA CEINTURE

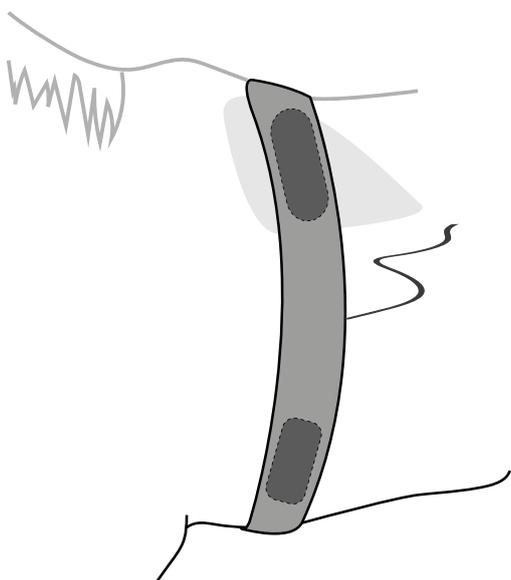

Installez la ceinture de manière à placer l'électrode dans le **creux du garrot à gauche**, en contact direct avec la peau du cheval.

4 CHERCHEZ LA PUCE VÉTÉRINAIRE DU CHEVAL

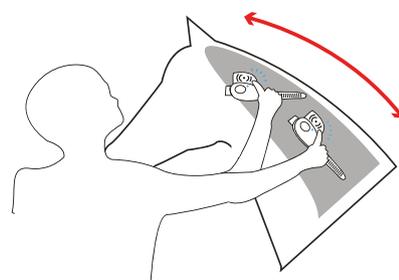


Cherchez la puce vétérinaire du cheval en scannant l'encolure avec le lecteur de puce. Allez du garrot aux oreilles **DOUCEMENT** jusqu'à entendre un bip sonore.

OU


Appuyez 3 fois sur le bouton pour démarrer un entraînement manuellement. L'identité du cheval pourra ensuite être assignée à la fin de l'entraînement.

Un bip sonore indique que l'entraînement a commencé. La LED blanche se fixe.



5 INSTALLEZ LE CAPTEUR DANS LA POCHE DU TAPIS

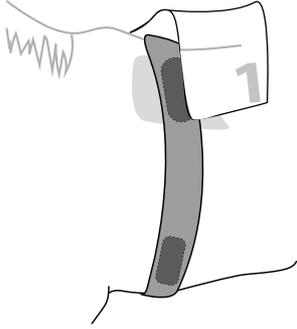

Placez le tapis Equimetre sur votre cheval et installez le capteur dans la poche prévue à cet effet.

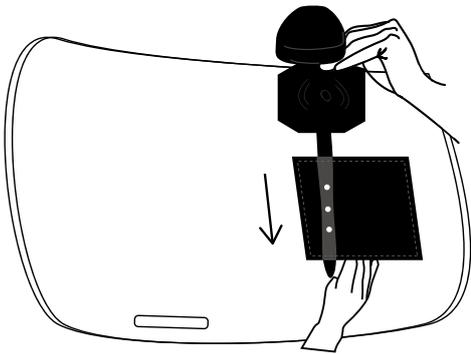


Glissez la languette dans la poche du tapis à l'aide de vos deux mains.

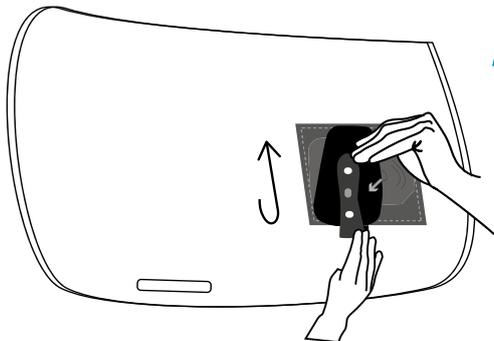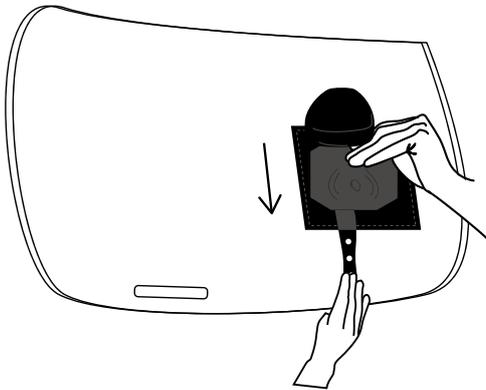


Sécurisez le capteur en attachant le passant. Le boîtier doit se situer à l'extérieur de la poche, et le lecteur de puce à l'intérieur.


6 CONNECTEZ LES CÂBLES DE LA CEINTURE ET DU CAPTEUR

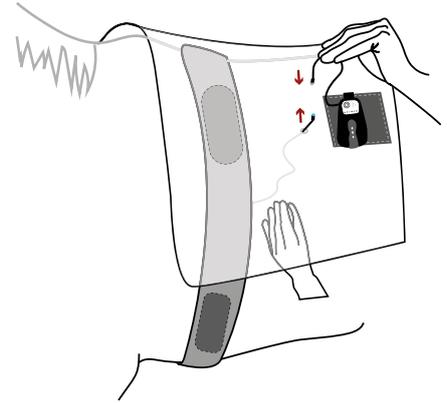



Passer le câble de la ceinture dans l'oeillet.

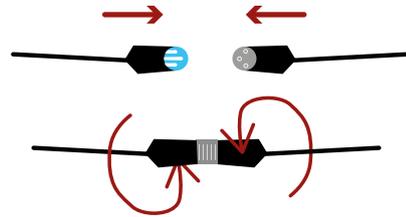


Connectez les deux câbles en alignant les 3 picots, et vissez dans les sens opposés.

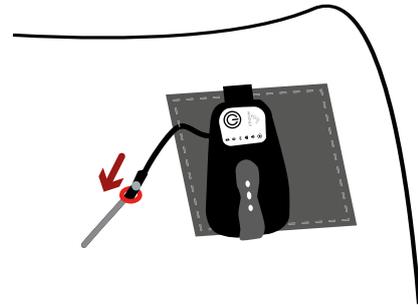


Une fois connectés, glissez les deux câbles sous le tapis à travers l'oeillet afin de les protéger.

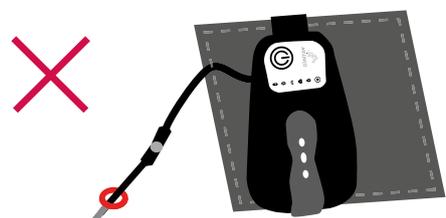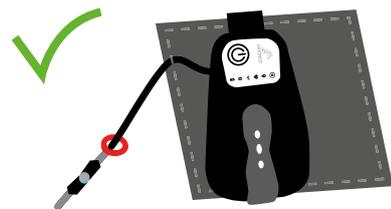

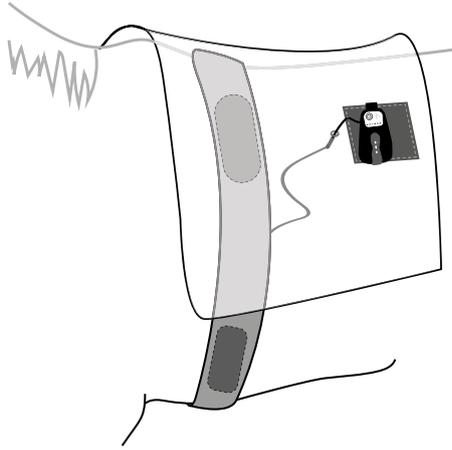

Les câbles ne doivent pas être apparents pour éviter qu'ils ne gênent. Vous pouvez seller votre cheval comme vous le faites habituellement.

7 ATTACHEZ LES SCRATCHS À LA SANGLE

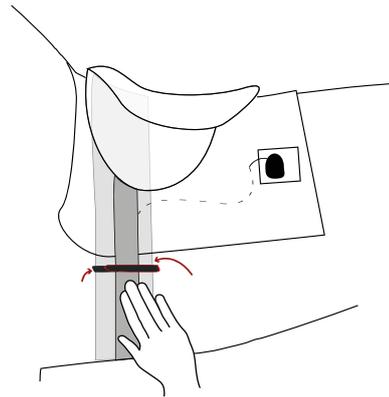

Attachez les scratchs des deux côtés du cheval pour sécuriser le positionnement de la ceinture.

8 VÉRIFIEZ QUE LE CARDIO FONCTIONNE CORRECTEMENT



La première LED blanche doit être allumée et fixe.




La deuxième LED verte indique le GPS, elle clignote jusqu'à avoir trouvé le signal. **NB:** elle peut clignoter lorsque vous êtes dans un endroit couvert, elle se stabilisera lorsque vous serez en extérieur.



La troisième LED rouge symbolise la fréquence cardiaque. Une fois le capteur correctement installé, cette dernière clignote au rythme du coeur de votre cheval.

13 VOUS ÊTES PRÊTS À PARTIR SI

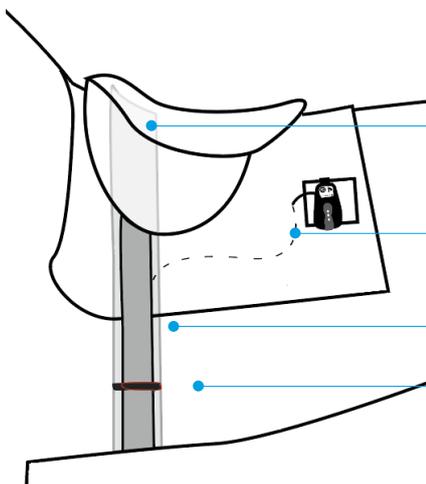

La ceinture est installée sous le tapis, contre la peau du cheval.

Le câble est placé sous le tapis pour ne pas gêner le cavalier.

Votre cheval est sanglé pour assurer une bonne conductivité du signal cardiaque.

Les scratchs sont fermés des deux côtés du cheval.

Comment enlever votre EQUIMETRE ?


À la fin de votre entraînement, il est important d'enlever votre EQUIMETRE en suivant les indications expliquées ci-dessous.

1 ÉTEIGNEZ LE CAPTEUR




Éteignez le capteur EQUIMETRE en appuyant 3 secondes sur le bouton. Toutes les LEDs s'éteignent.

2 DÉVISSEZ LES CÂBLES

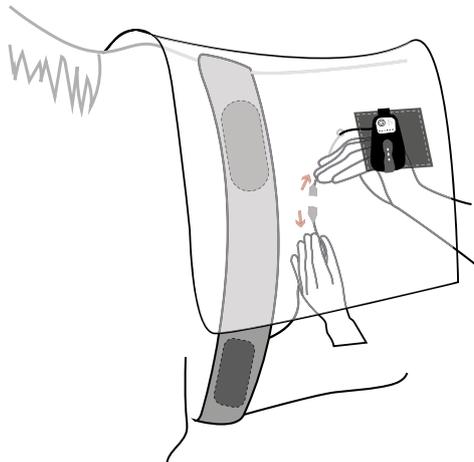


Attention : Ne pas oublier de déconnecter les câbles avant de desseller, sinon vous risquez de les casser.

3 DÉTACHEZ LES SCRATCHS

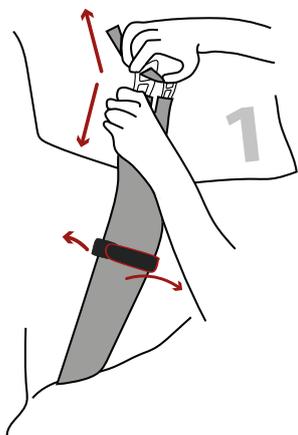


Détachez les scratchs de la sangle afin de pouvoir desseller votre cheval.

4 ÉTENDEZ LA CEINTURE AVANT LA PROCHAINE UTILISATION

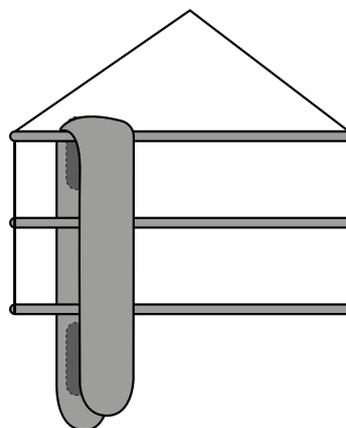

Attention : Étendez votre ceinture afin d'éviter que les câbles à l'intérieur ne s'abîment, et pour qu'elle puisse sécher correctement.

5 RECHARGEZ LE CAPTEUR EQUIMETRE

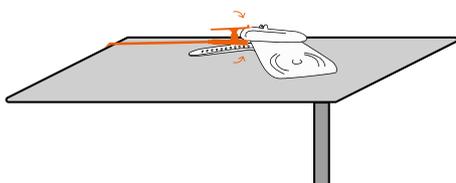


Attention : Hors utilisation, veillez à toujours brancher EQUIMETRE à la pince d'alimentation et vérifiez que le capteur est bien éteint. La LED orange de chargement est allumée.

Comment synchroniser vos données ?

À la fin de votre entraînement, récupérez les données du capteur grâce à votre téléphone.


1 CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION EQUIMETRE

⚠ ÉTEINT & À PROXIMITÉ

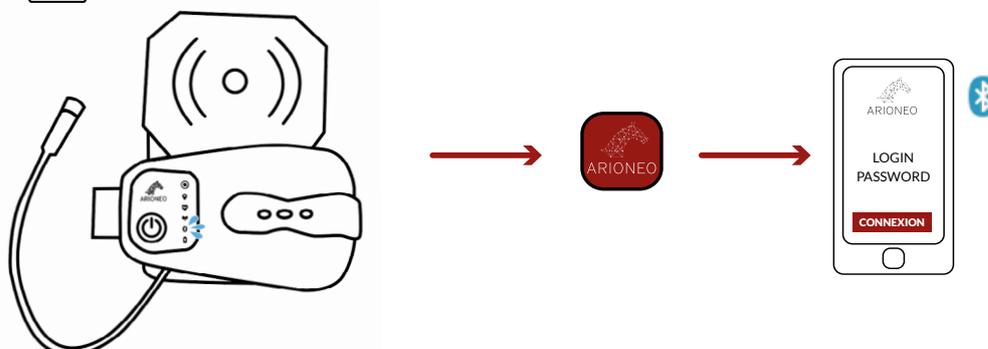

2 CLIQUEZ SUR LE BOUTON «SYNCHRONISER»


⚠ ÉTEINT & À PROXIMITÉ

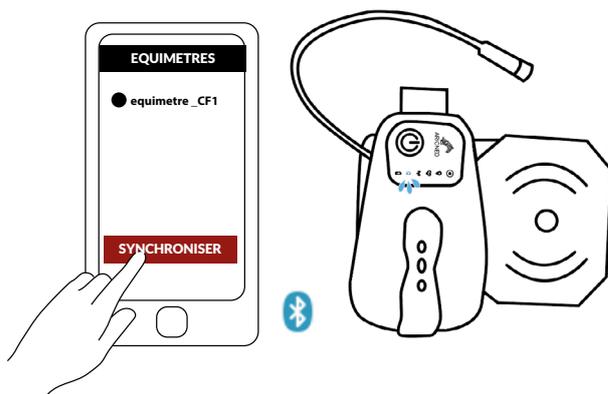

La jauge de téléchargement avance jusqu'à 100%.

Votre téléphone doit être proche du capteur. La LED bleue du bluetooth doit se mettre à clignoter.

3 DANS L'ONGLET «ENTRAÎNEMENTS» VOUS RETROUVEZ LA LISTE DES ENTRAÎNEMENTS TÉLÉCHARGÉS

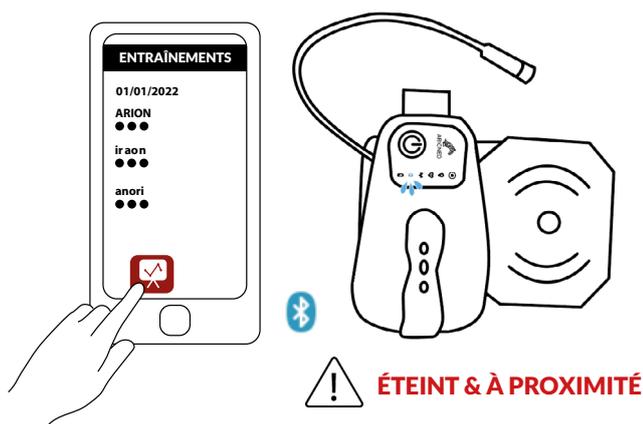

Les entraînements s'envoient automatiquement sur les serveurs afin que vous puissiez les retrouver depuis n'importe quel appareil sur la plateforme web Equimetre.com.

Cliquez sur l'entraînement pour le consulter directement depuis l'application.